



## MODALITES pour le Prélèvement de sang sur Tube PAXgene

*A l'intention des préleveur(se)s*

Les tubes PAXgene sont utilisés pour le prélèvement de sang total en vue d'une conservation et extraction des transcrits (ARN).

Les tubes PAXgene sont mis à disposition sur demande au laboratoire d'oncogénétique.

### Prélèvement :

Le tube est à mettre à température ambiante et à l'abri de la lumière avant d'être utilisé. Le prélèvement s'effectue de la même manière que pour les tubes BD Vacutainer Safety Lock.

Prélever 2,5 ml de sang (volume minimum).

Immédiatement après, **retourner** le tube doucement, **minimum 10 fois**.

Conserver le tube en position verticale au minimum 2h et au maximum 72h à température ambiante.

### Se conserve ensuite :

- 3 jours entre +18°C et +25°C
- 5 jours entre +2°C et +8°C
- 6 mois à -20°C ou -70°C