



MODALITÉS pour le Prélèvement de sang sur FTA Card

A l'intention des préleveur(se)s

A votre disposition : une enveloppe contenant une carte en papier 3M.

A l'intérieur de cette carte se trouve un cercle.

Attention : porter des gants ou utiliser des pinces stériles pour manipuler les cartes FTA

- Déposer au centre du cercle un échantillon sanguin **sans l'étaler**
 - Soit maximum 75 μ l de sang prélevé sur EDTA
 - Soit plusieurs gouttes de sang de piqûres au doigt
- Porter le nom du patient et la date de naissance sur l'avant de la carte (lignes prévues à cet effet).
- **Laisser sécher le disque à température ambiante (ne pas chauffer) pendant 1 heure.**
- Replacer la carte dans l'enveloppe.
- Identifier l'enveloppe. Une seule enveloppe par patient.

**Ne pas surcharger
le support**

Envoyer l'enveloppe accompagnée de l'ordonnance et de la demande d'examen à :

Laboratoire d'oncogénétique
Centre Paul STRAUSS
3 rue de la Porte de l'Hôpital
67065 STRASBOURG cedex
Mail : labogenet@strasbourg.unicancer.fr

DI-077-05